


Instructions pour l'assemblage:


Écran facial anti-éclaboussures - Protection jetable

- 1** Faire glisser
- 2** Bâton
- 3** La fermeture à glissière


- 1** **Faites glisser la sangle dans les passants de ceinture**
Alignez le pli sur la sangle avec le centre approximatif de l'écran.

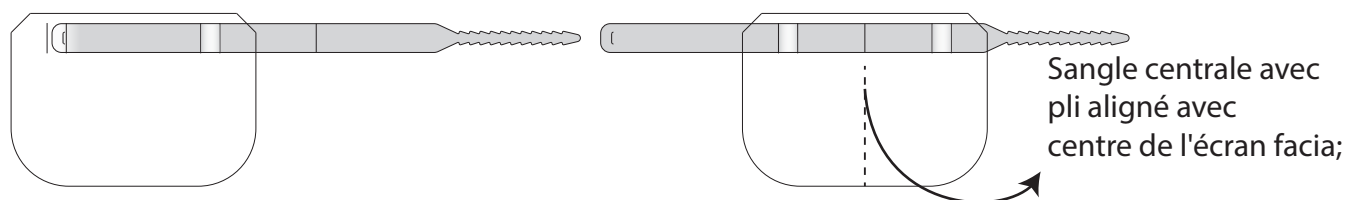

- 2** **Bâton**
Retourner le bouclier, la mousse Peel & Stick pour protéger entre les passants de ceinture.

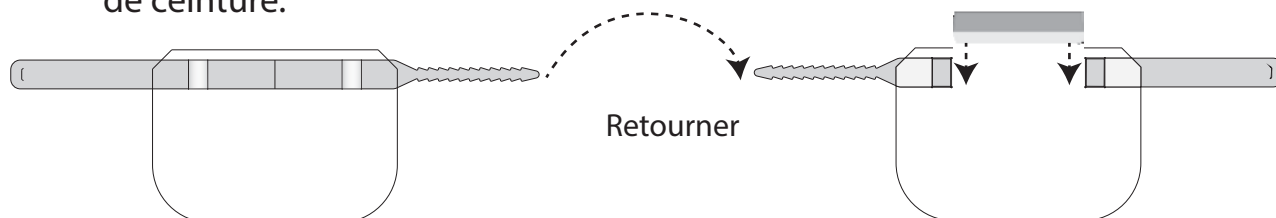

- 3** **La fermeture à glissière**
Insérez l'extrémité de la fermeture à glissière de la sangle dans la fente. Placez sur la tête et tirez pour un ajustement confortable

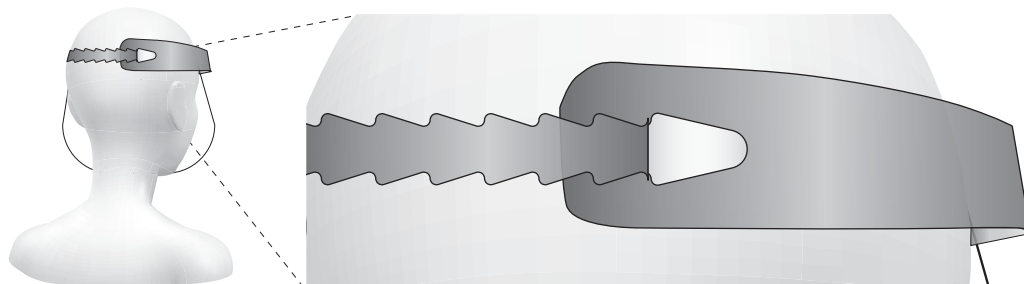

Endroit de Manufacture:

555 Raymond Drive
Islandia, NY 11749 USA
631-234-4300

3478 Ashby,
St. Laurent, QC H4R 2C1 Canada
514-335-1775

